

Produktinformation

CRDLIGHT

PARTIKELFILTER MASKE Artikel-Nr.: CRD-YY0525

Beschreibung

Die CRDLIGHT Partikelfiltermaske zeichnet sich durch eine effiziente Filtration von bis 94% bei Pollen, Tröpfchen, Staub und Smog aus. Sie sorgt durch den einstellbaren Nasensteg für eine optimale Abdichtung zwischen Nasenrücken und Maske und dadurch für eine freie Atmung. Solide Ultraschall-Punktschweißkantenpressung für starke und hochelastische Ohrschlaufen geben der Maske einen komfortablen und sicheren Halt.

Eigenschaften:

Form:	faltbar
Größe:	15,5 x 10,5 cm
PFE (Partikel-Filterwirkungswirkungsgrad):	bis 94%, Anti-PM2.5, Anti-Pollen, Anti-Tropfen
Normen:	EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
Produktionsland:	China / Jiangmen Yanyang Trading Co., Ltd.



Material:

Bestehend aus insgesamt 5 Schichten:

- Filament-Vliesgewebe, flexible moderate Dicke
- Heißluft-Baumwolle
- Adsorptionspartikel
- doppelagige Meltblown-Filter

Außerdem:

Nasenclip: Sichere Abdichtung durch weichen Nasensteg aus Metall für beste Abdichtung zwischen Nasenrücken und Maske

Aufsetzanleitung:

1. Drücken Sie die Maske mit dem Metallstreifen nach oben gegen das Gesicht.
2. Legen Sie die Bänder um beide Ohren.
3. Legen Sie das Metallband über den Nasenrücken, die Maske sollte eng über dem Gesicht anliegen.
4. Drücken Sie die Maske mit beiden Händen gegen das Gesicht, um Luftlecks abzudichten

Lieferform

Verpackungseinheit Kit: Inhalt 25 Stück, einzeln verpackt
Verpackungseinheit Karton: Inhalt 40 Kits (1.000 Stück)

Einschränkungen

1. Überprüfen Sie das Ablaufdatum und die Maske vor der ersten Anwendung
2. Benutzen Sie die Maske nicht nach Ablauf des Verfallsdatums oder wenn sie beschädigt ist
3. Verwenden Sie keinen Mikrowellenherd, um die Maske zu desinfizieren
4. Überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass die Maske und die Bänder richtig fest sitzen
5. Die Maske kann in Räumen mit schlechter Belüftung durch einen Sauerstoffmangel (unter 19,5% vol) nicht verwendet werden
6. Bemerken Sie einen erhöhten Atemwiderstand, ersetzen Sie die Maske umgehend durch eine neue
7. Um die Maske sauber zu halten, vermeiden Sie das Berühren der Innenseite der Maske mit Ihren Händen
8. Nicht empfohlen für Kinder unter drei Jahren wegen geringer Lungenkapazität

Lagerung

- Bitte lagern Sie die Masken in einem Temperaturbereich von -20°C bis 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80%

ulti med Products (Deutschland) GmbH
Reeshoop 1 | 22926 Ahrensburg | Deutschland
Telefon: +49 4102 - 800 90
sales@ultimed.org | www.ultimed.de

Technische Updates vorbehalten. Abbildungen können abweichen.